


A low-angle shot of a middle-aged man with grey hair, smiling broadly. He is wearing a dark wetsuit and holding a surfboard high above his head with both hands. The sun is shining brightly through the gap in the surfboard, creating a strong lens flare and illuminating his face. The background is a bright, hazy sky.

Urostomía

Primera Ayuda

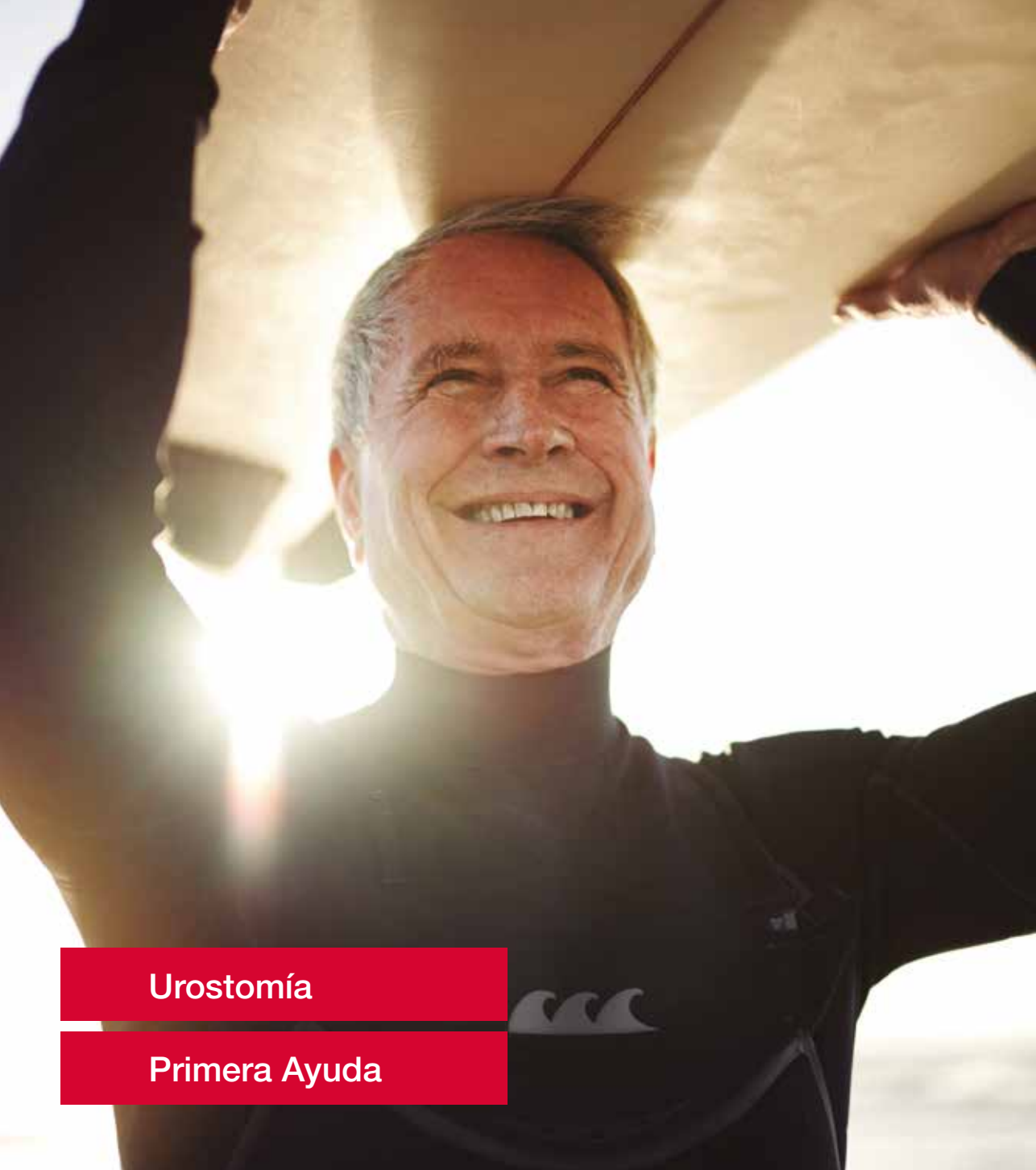

Ostomy Care

Piel Cuidada. Resultados Positivos



Contenidos

- 3** Una nueva situación
- 4** Anatomía del aparato urinario
- 5** La higiene del estoma
- 6** Mi bolsa de urostomía
- 7** Aplicación de bolsas de 1 pieza
- 8** Aplicación de bolsas de 2 piezas
- 9** Cómo abrir, vaciar y cerrar mi bolsa
- 10** Consejos para el cuidado del estoma
- 11** La alimentación en las urostomías
- 13** Un día normal en su vida
- 15** Quimioterapia y radioterapia
- 15** Asociaciones

Esta guía le facilitará a usted y a su familia una información sencilla y práctica sobre los principales cuidados y hábitos que le recomendamos seguir cuando regrese a casa.

La información que aquí se recoge ha sido elaborada en base a la “universidad de la vida”: la experiencia de personas ostomizadas que han pasado por su misma situación, y también la de profesionales sanitarios que trabajan por su satisfactoria recuperación y calidad de vida.

Gracias a los miembros de la Asociación de Ostomizados de Madrid por su valiosa aportación en esta guía educativa.

Avalada por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia.

Una nueva situación

Usted ha pasado por una cirugía en la que le han realizado una urostomía.

Su enfermera le explicará que:


- Una urostomía consiste en derivar hacia el exterior el flujo de orina que se ha formado en los riñones, sin pasar por la vejiga.
- Un estoma es la abertura que se crea quirúrgicamente entre el aparato urinario y el exterior del cuerpo, por donde sale la orina. Es de color rojo, suave y húmedo.
- Una persona urostomizada no podrá controlar la salida de orina como hasta ahora, por eso necesitará una bolsa que la recoja.
- La zona que rodea su estoma, se llama piel periestomal y es fundamental cuidarla, mantenerla limpia y protegerla del contacto con la orina para evitar irritaciones.

Los primeros meses después de la operación son un momento de adaptación a una nueva situación, y puede tener la impresión de que todo gira en torno a su urostomía. Poco a poco ganará confianza en sí mismo, su estoma dejará de ser el protagonista a la vez que usted se reincorporará gradualmente a su vida cotidiana.

Esperamos que los contenidos de esta guía respondan a las preguntas y situaciones que le surjan en la vuelta a su hogar después de la operación, y que le ayuden a retomar su día a día de forma gradual y positiva.

Anatomía del aparato urinario

Pídale a su enfermera que le explique en el siguiente gráfico cómo es su aparato urinario, cómo funciona, y dónde está situada su urostomía.

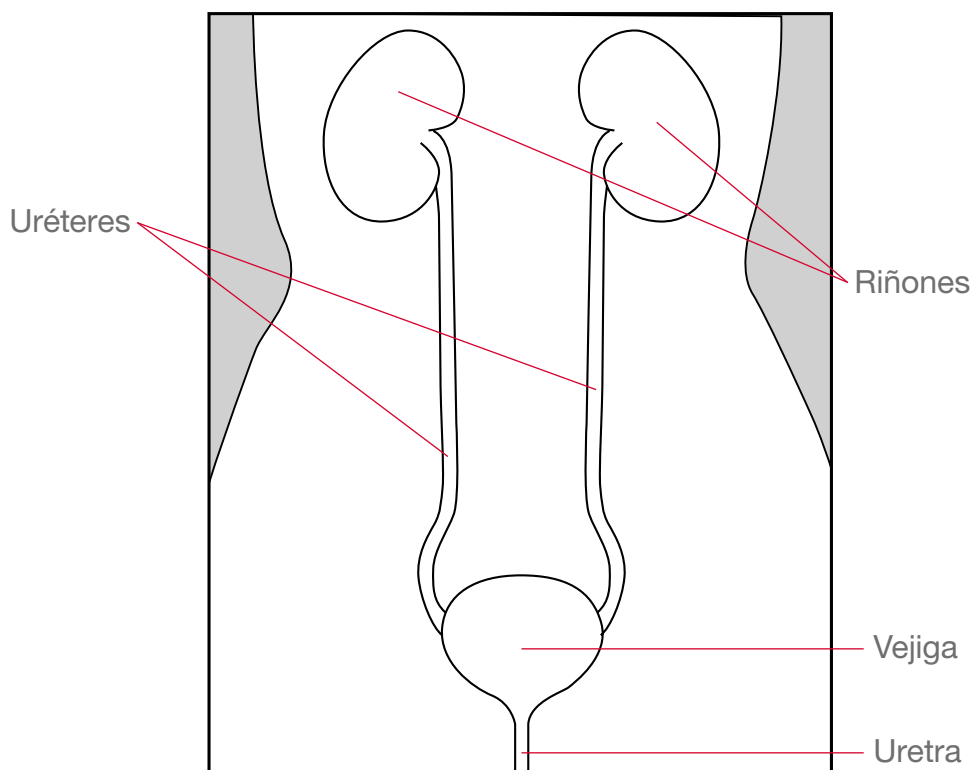

Es normal que en determinados tipos de urostomías, se expulse orina con mucosidad.

Notas

Higiene del estoma

Prepare antes el material necesario: bolsa para desechar la bolsa usada, gasas y papel para lavar/secar, agua tibia y jabón neutro, medidor de estoma, tijeras y nueva bolsa.



- Lave sus manos con agua y jabón.



- Retire la bolsa usada suavemente desde arriba hacia abajo. Sujete la piel para evitar tirones.



- Limpie suavemente su estoma con agua tibia y jabón neutro.



- Seque la piel y el estoma con una toalla de algodón o papel absorbente.

CONSEJOS

- Humedezca una toalla para ayudar a despegar la lámina.
- Si se ducha sin bolsa, evite el agua caliente y la presión sobre el estoma.
- Si ve sangre en el estoma, presione con una esponja mojada en agua fría.
- Si necesita eliminar el vello de la zona, recórtelo con tijeras.
- No aplique ninguna crema que no le haya recomendado su enfermera.

Mi bolsa de urostomía

Las personas portadoras de una urostomía utilizan bolsas con válvula de vaciado, tienen un grifo en la parte inferior para vaciar la bolsa. Existen varios tipos, su enfermera le recomendará cual debe usar.

- **De 1 pieza:** la lámina y la bolsa están unidas. Se coloca todo de una sola vez sobre el abdomen. La bolsa se vacía cuando se encuentre a la mitad de su capacidad, y se cambia por otra nueva una vez al día.
- **De 2 piezas:** la lámina y la bolsa están separadas. Primero se pega la lámina al abdomen y luego se acopla la bolsa. La lámina se cambia cada 3 ó 4 días. La bolsa se vacía cuando se encuentre a la mitad de su capacidad, y se cambia por otra nueva una vez al día.

En el hospital utilizará bolsas transparentes pero en casa puede usar bolsas opacas, son más discretas.

Las bolsas de urostomía tienen en su interior una válvula antirreflujo, que impide que la orina vuelva a introducirse por el estoma, evitando infecciones de orina.

¿Dónde consigo mis bolsas de ostomía?

Las bolsas de ostomía se adquieren en la farmacia con la primera receta que le den en el hospital y después con la que le hará su médico de cabecera, normalmente con el material necesario para un mes.

CONSEJOS

- En el hospital, pida a su médico/enfermera la primera receta, y así tener el material cuando regrese a casa.
- La farmacia no tiene el producto disponible inmediatamente, puede tardar unos días.
- Cuando adquiera su caja en la farmacia, solicite una nueva para el próximo mes y así tener el material siempre disponible.
- Para facilitar la elaboración de la receta en el Centro de Salud y su dispensación en la farmacia, lleve anotada la descripción del producto y su código nacional.

Aplicación de bolsas de 1 pieza



- Mida el tamaño del estoma.



- Dibuje con la plantilla la línea de recorte.



- Recorte la lámina con unas tijeras justo al tamaño del estoma.



- Retire el protector transparente de la lámina. Evite tocar en exceso el adhesivo con los dedos.



- Ajuste el orificio central de la lámina a la parte inferior del estoma y péguela de abajo hacia arriba.



- Dé calor a la lámina con las manos y tire de la bolsa para comprobar su perfecta sujeción a la piel.

Aplicación de bolsas de 2 piezas



- Mida el tamaño del estoma.



- Dibuje con la plantilla la línea de recorte.



- Recorte la lámina con unas tijeras justo al tamaño del estoma y retire el protector transparente.



- Ajuste el orificio central de la lámina a la parte inferior del estoma y péguela de abajo hacia arriba.



- Acople la bolsa en la lámina mediante el anillo flotante.



- Dé calor a la lámina con las manos y tire de la bolsa para comprobar su perfecta sujeción a la piel.

Cómo abrir, vaciar y cerrar mi bolsa

La bolsa se puede vaciar directamente en el inodoro mediante el cierre en forma de grifo que tiene en la parte inferior. Sólo hay que girarlo y la bolsa se vaciará.

Cuando veamos el símbolo de gota en relieve en el grifo, quiere decir que la bolsa está abierta.



En las cajas las bolsas siempre vienen cerradas.

Para llevar una vida diaria normal y no tener que vaciar la bolsa tan a menudo, puede utilizar una bolsa de recogida de orina durante el día para salir a dar un paseo, ir a la compra o salir con los amigos.

Para dormir tranquilamente y sin preocupaciones, puede utilizar una bolsa de recogida de orina de cama de gran capacidad, y evitar tener que despertarse para vaciarla.

Estas bolsas se conectan mediante un adaptador que encontrará en las cajas de las bolsas de urostomía.



- Bolsa de recogida de orina colocada en el gemelo (día).



- Bolsa de recogida de orina de cama y colgador (noche).

Consejos para el cuidado del estoma



Mida el diámetro del estoma.

Durante los tres primeros meses tras la operación, mida semanalmente el tamaño del estoma ya que irá disminuyendo paulatinamente. En cada caja de dispositivos encontrará un medidor.



Aplice calor a la lámina.

Puede frotarla con las manos o ponerla en contacto con la piel (en el pecho o en la cinturilla del pantalón), nunca con secador de aire. Mejorará su adherencia antes de su aplicación.



Suavice los bordes de la lámina.

Cuando se recorta la lámina, es normal que queden bordes o picos que podrían irritar el estoma. Suavícelos con las yemas de los dedos.



Ajuste la lámina al estoma.

No deje espacios de piel visible entre el estoma y el adhesivo ya que la piel se irritaría ante el contacto con la orina. Recorte la lámina justo al tamaño del estoma sin llegar a estrangularlo.



Dé masaje circular a la lámina y abdomen.

Una vez ajustada, aplique movimientos circulares a la lámina, para mejorar su adherencia y evitar pliegues y arrugas. También puede presionar la lámina suavemente con la palma de la mano.

Es fundamental que mantenga limpia la zona alrededor del estoma y protegida del contacto con la orina, ya que aparecerían molestias, irritaciones, picazón o dolor. En ese caso debe retirar la bolsa y la lámina, lavar la zona, secar, y colocar un nuevo dispositivo.

CONSEJOS

- Muchos estomas no son redondos, asegúrese de que la lámina se adapta y no deja piel expuesta.
- Puede colocarse delante de un espejo para medir el estoma y aplicar la nueva bolsa.
- Si aparecen las molestias, puede usar accesorios de barrera (pasta o anillos) para aislar la piel de la orina, o protector cutáneo en polvo para absorber humedades y regenerar la piel.
- Es posible que en la piel periestomal se acumulen residuos de orina, de aspecto brillante. Para eliminarlos limpie la piel una vez al mes con unas gotitas de vinagre diluidas en agua.

La alimentación en las urostomías

En la mayoría de los casos, la urostomía casi no afecta a la dieta. Agregue alimentos gradualmente para ver cómo los tolera su nuevo sistema. Para mantener los riñones funcionando correctamente y ayudar a prevenir infecciones urinarias, deberá beber mucha agua todos los días.

Si tiene dudas sobre la dieta o la ingesta de líquidos, pregunte a su profesional sanitario de referencia.

CONSEJOS

- Beba a diario mucha agua para ayudar a prevenir infecciones urinarias.
- Ingiera una dieta equilibrada
- Recuerde que, si come remolacha, la orina tendrá un color rojizo. Esto es temporal, y no es motivo para alarmarse
- Recuerde que los espárragos, los mariscos, los suplementos nutricionales y algunos medicamentos pueden afectar el olor de la orina

Olor

El olor es una preocupación para las personas que se someten a una cirugía de urostomía. Hoy en día, las bolsas de urostomía se elaboran con una película que funciona como barrera para el olor, de modo que el olor de la orina quede contenido dentro de la bolsa. Solo debería notarlo cuando está vaciando o cambiando la bolsa. Si nota olor en cualquier otro momento, verifique el sellado de la bolsa para detectar fugas.

Prevención de las infecciones urinarias

Las personas con derivaciones urinarias pueden desarrollar infecciones urinarias, lo que puede generar problemas en los riñones.

Si nota cualquiera de estos síntomas, comuníquese con su profesional sanitario. Algunos signos de alarma de una posible infección urinaria son:

- Orina oscura y turbia
- Orina con olor fuerte
- Dolor en la espalda (a la altura de los riñones)
- Fiebre
- Pérdida del apetito
- Náuseas
- Vómitos

Un día normal en su vida

Cuando regrese a casa después de la operación se preguntará cómo será su vida a partir de este momento. Su colostomía no tiene por qué afectar a su vida cotidiana. Le recomendamos que se haga cargo de sus propios cuidados, comparta sus sentimientos, y vuelva a hacer su vida habitual.

Al principio notará el abdomen hinchado, utilice ropa amplia e intente pasear para restablecer la circulación y reducir esta incómoda sensación. Evite realizar esfuerzos físicos para prevenir la aparición de una hernia.

Debe tener en cuenta que su recuperación no siempre será constante, a veces se avanza pero otros días tendrá la sensación de que ha retrocedido. Esto puede provocarle emociones de tristeza o irritabilidad. Son reacciones habituales a lo largo del proceso de recuperación, compártalo con sus familiares y amigos.

A continuación le damos algunos consejos que pueden resultarle de utilidad.

Cómo vestirse.

Puede seguir vistiendo como lo hacía antes de la operación, solamente evite las prendas que compriman en exceso el estoma.

- Puede colocar el dispositivo de ostomía por encima o por debajo de la ropa interior, lo que resulte más cómodo.
- Las mujeres pueden llevar medias y también faja.
- Los hombres pueden sustituir el cinturón de los pantalones por tirantes.
- Existe una gran variedad de estilos de trajes de baño para mujeres, escoja el que más le favorezca. Para los hombres, el boxer tiene una cintura elástica más alta.



Ocio y tiempo libre

Es muy beneficioso para usted retomar las actividades con las que disfrutaba antes de la intervención.

La práctica de deporte no está contraindicada:

- Proteja el estoma con una faja si existe riesgo de lesión en el estoma. Evite disciplinas de contacto.
- Puede bañarse en la piscina y en la playa con la bolsa puesta.

Si antes de la operación le gustaba viajar, no deje de hacerlo ahora:

- Lleve siempre anotado el nombre, la referencia del producto que usa, y el nombre del fabricante para casos de necesidad.
- Use ropa cómoda fácil de quitar.
- Si viaja en avión, lleve sus productos en el equipaje de mano.
- Lleve el doble de material del que utiliza normalmente.
- No deje al sol sus bolsas y accesorios.
- Puede usar una bolsa de congelados para transportar sus bolsas en verano.

Un cambio en el agua, puede causar alteraciones en sus hábitos intestinales. Beba sólo agua embotellada y tenga cuidado con:

- El agua del grifo y el hielo en las bebidas.
- Limpieza de los dientes con agua del grifo.
- Vegetales crudos y frutas que usted no haya lavado o pelado.
- Cremas, helados y mayonesas.
- Carnes, pescados y mariscos, a no ser que estén recién hechos y calientes.

Quimioterapia y radioterapia

Puede ser que debido a su enfermedad necesite un tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

Existen varios tipos, su enfermera le recomendará cual debe usar.

- Fumar puede reducir el efecto de su tratamiento.
- Debe beber suficiente líquido.
- Notará un sabor metalizado en los alimentos.
- Consulte sobre su alimentación durante esta fase.
- El estoma puede cambiar de tamaño y forma durante las sesiones de tratamiento.
- La piel cambiará su ph, por lo que puede tener problemas a la hora de pegar la bolsa.

Asociaciones

Si tiene cualquier duda o inquietud, puede ponerse en contacto con la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia, responderán a sus preguntas o le remitirán a un experto en ostomías cercano a su domicilio.

www.estomaterapia.es
estomaterapia@estomaterapia.es

También existen Asociaciones de Ostomizados, organizaciones sin ánimo de lucro donde podrá compartir su experiencia con personas que se encuentran en su misma situación y donde le ofrecerán ayuda y orientación sanitaria, psicológica, jurídica o social.

Hollister Ibérica S.A
Avda. de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es



Tenga en cuenta que esta literatura es un complemento y no un reemplazo de la recomendación de su profesional sanitario.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logotipo de Hollister y "Piel Cuidada. Resultados positivos." son marcas registradas de Hollister Incorporated.



© 2023 Hollister Incorporated. ESO028